

Гидропомпы Bathmate

Производятся в Англии с 2006 г



Гидропомпа служит для тренировки эрекции и увеличения пениса

Используется в ванной или душе

Для создания вакуума откачивается не воздух, а вода

Преимущества по сравнению с обычной вакуумной помпой:

- + Эффективнее на 30%
- + Безопасна в использовании, не оставляет синяков и растяжений (за счет теплой воды улучшается кровообращение)
- + Для измерения прогресса на колбу нанесена специальная шкала
- + Бесшумна
- + Можно использовать без смазки

Материал: гипоаллергенный силикон и высокопрочный пластик

Уход: можно мыть при температуре до 80°C в мыльном растворе.

Время использования: 15 -20 минут , 3-5 раз в неделю

Результат: уже через месяц можно добиться стойкой эрекции и увеличения пениса на 1 см

ВИДЫ ГИДРОПОМП ВАТНМАТЕ

3 поколения



	Общая длина	Вместимость	Диаметр	Цвета	Комплектация	Особенности
Геркулес	30 см	21 см	5,6 см	Прозрачный Красный Голубой	1. Гидропомпа	Классическая гидропомпа 1ой модели
Голиаф	35 см	27 см	7,6 см	Прозрачный	1. Гидропомпа 2. чехол мягкий 3. ремень для душа 4. Спец. линейка	Самая большая гидропомпа. На 30% больше Геркулеса. Новая пружина дает более мощный вакуум

Гидромакс Х30	30 см	21 см	5,7 см	Прозрачный Красный Голубой	1. Гидропомпа 2. Кольцо вставка	Новая система фиксации вакуума Вакуум мощнее на 35%
Гидромакс Х40	32,5	25 см	6,7 см	Прозрачный Красный Голубой		Новая система фиксации вакуума Вакуум мощнее на 35%
Xtreme Х30	30 см	21 см	5,7 см	Прозрачный	1. Гидропомпа 2. Водная груша 3. ремень для душа 4. Спец. линейка 5. Щетка для чистки 6. Водная груша 7. Замок для чехла 8. Полотенце фирменное 9. Кольцо вставка 10. Чехол большой	Полный комплект. (в комплекте помпа Гидромакс Х30)
Xtreme Х40	32,5	25 см	6,7 см	Прозрачный		Полный комплект. (в комплекте помпа Гидромакс Х40)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВАННОЙ

ШАГ 1. Наполните ванну теплой водой и отдохните 5 минут.

За это время ткани расслабляются и делаются эластичными, улучшается кровообращение.


Сравнение: подготовка подобна разминке для спортсмена перед тем как сесть на шпагат.

+ За счет разогрева теплой водой в течение всего использования гидропомпы, она абсолютно безопасна, не оставляет синяков и растяжений.



ШАГ 2. Наполните гидропомпу водой и оденьте на пенис.

Для версий Х30 и Х40 верхний черный клапан необходимо выставить в центральное положение

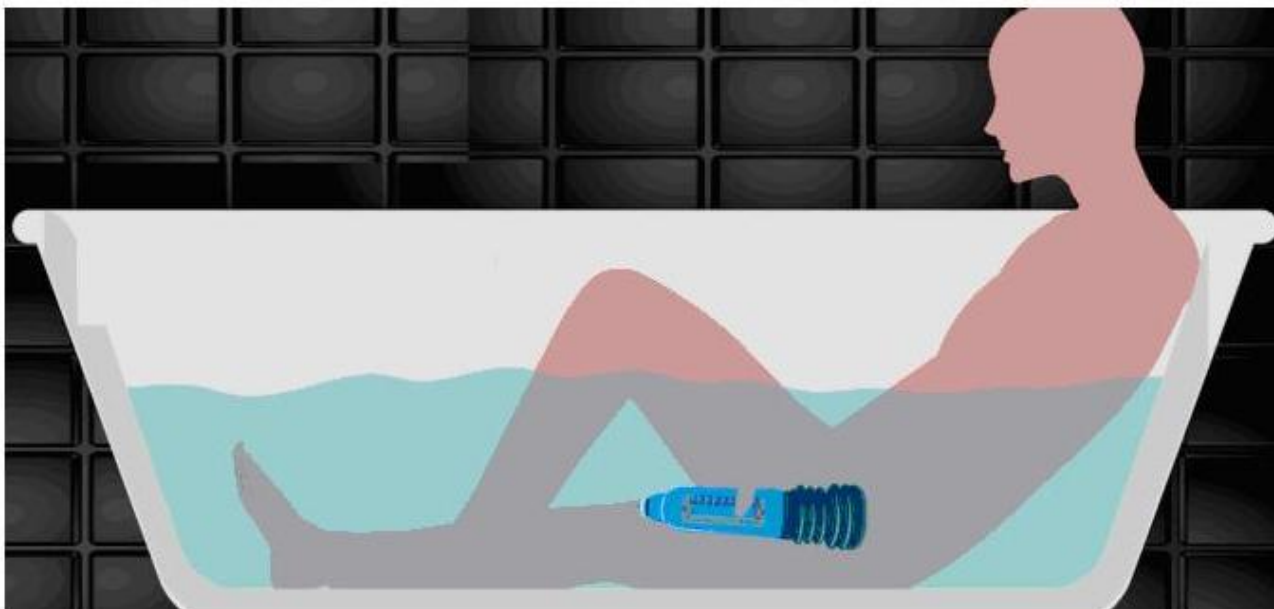

Внимание! Скос основания должен быть направлен вниз, как показано на рисунке.
Помпа должна плотно прилегать для создания герметичности.



Для помп Х30 и Х40 необходимо вставить комфортное серое кольцо, так чтобы линии на помпе и кольце совпали




ШАГ 3. Начните нажимать на помпу, часть воды через верхнее отверстие будет выходить, при этом создается разрежение, и кровь заполняет пенис. Деления на мерной шкале помогут контролировать силу воздействия.

Особенность: большая часть теплой воды остается в помпе, положительно влияя на эластичность тканей.



ШАГ 4. Через 3-5 минут необходимо слить воду, 1 минуту отдохнуть (в это время можно сделать массаж пениса) и повторить процедуру 3-5 раз (не более 15-20 минут в день)

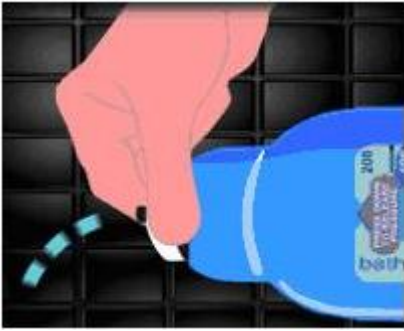Для того, чтобы слить воду:

<p>Гидропомпы Геркулес и Голиаф</p>		<p>Нажмите на верхнюю кнопку</p>
<p>Гидропомпы X30 и X40</p>		<p>Сместите регулятор в центр. Для закрытия (в стороны).</p> 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДУШЕ

Принцип использования гидропомпы в душе аналогичен

<p>Шаг 1 разогрев</p> 	<p>Шаг 2 наполните помпу водой</p> 	<p>Шаг 3 Нажатием на помпу, слейте часть воды</p> 
---	--	---



Для удобного использования в душе есть дополнительная опция: «Свободные руки». Ремень крепится к помпе и поддерживает ее.

Ремень идет в комплекте к помпам:

- * Голиаф
- * Xtreme X30
- * Xtreme X40

А также его можно приобрести отдельно.

ГИДРОПОМПА XTREME

В гидропомпе Xtreme добавлена дополнительная возможность откачки воды грушей.
А также добавлены все необходимые аксессуары (см стр2)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Гидродуш анальный



Сменные вставки к помпам X30 и X40

Эрекционные кольца



Сменные вставки к помпам Геркулес и Голиаф



Линейка для измерения длины и диаметра пениса. С удобными фиксаторами.
Для измерения объема линейка надевается на пенис и фиксируется объем в нужной части.

Идет в наборе к помпам:
* Голиаф
* Xtreme X30
* Xtreme X40
Также приобретается отдельно.

Набор для очищения помпы



Удобная щеточка на длинной ручке для очищения помпы



Идет в наборе к помпам:
* Голиаф
* Xtreme X30
* Xtreme X40
Также приобретается отдельно.

Чехол для помпы на замке



Ремень для душа



Идет в наборе к помпам:
* Голиаф
* Xtreme X30
* Xtreme X40
Также приобретается отдельно.